


## Calibración del dispositivo de seguimiento de mirada

### Pasos previos:


1. Colocar el lector debajo de la pantalla del ordenador.
2. Conectar el lector con el cable.
3. Encender el dispositivo.
4. Confirmar que el ordenador tiene batería.
5. Ver si hay actualizaciones pendientes y actualizar si es necesario.

### Configuración:


- Nos fijaremos en la esquina inferior derecha para observar si lee correctamente los ojos.

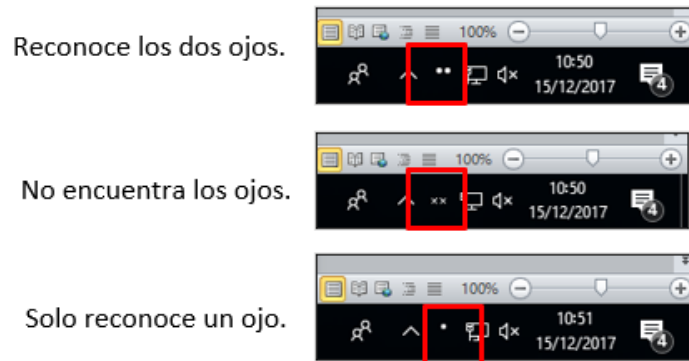

- Haciendo click sobre este icono se abre la bandeja del programa del lector.

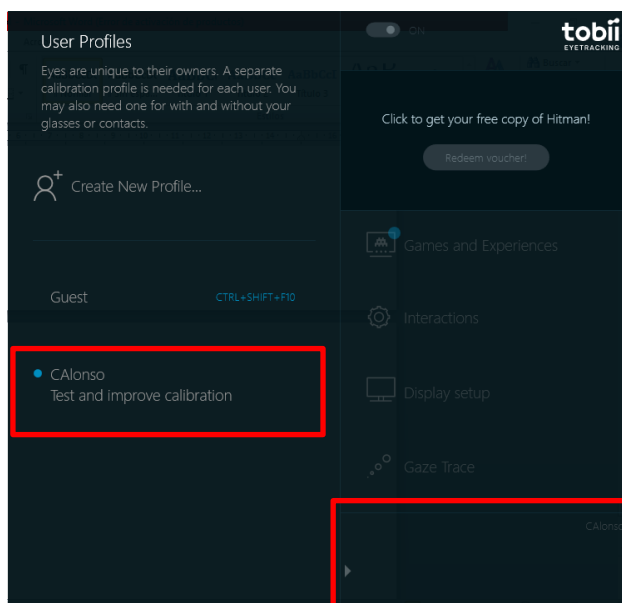

Haz click en esta área para acceder a los perfiles de usuario.

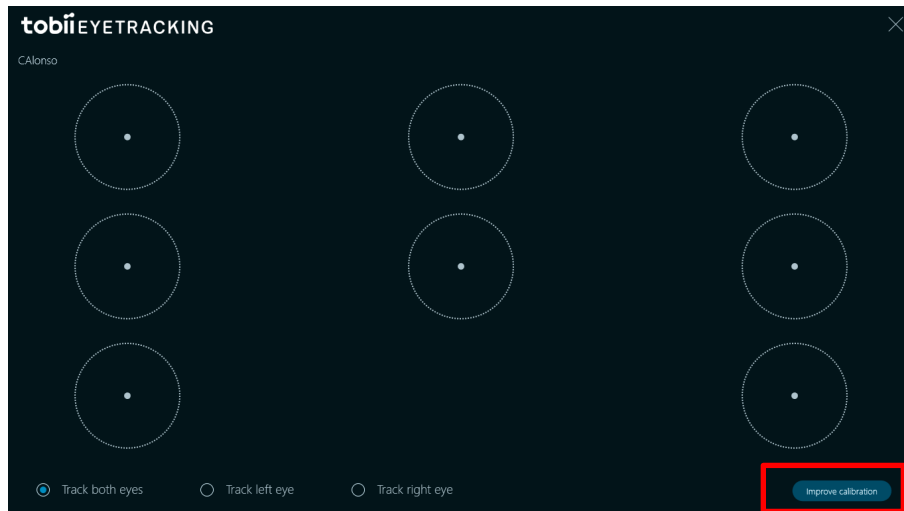

- Para calibrar el dispositivo, el usuario debe mirar a cada punto de uno en uno hasta que explote, cuando esto suceda, el usuario debe mantener la mirada en el siguiente hasta haber hecho explotar todos los puntos.

### Display Setup

- No sólo es necesario calibrar el dispositivo mediante el perfil, es necesario también que el dispositivo esté correctamente alineado con la pantalla. Debe estar a 50-60 cm de distancia de la persona.

