

Instrucciones para configurar el comunicador con lector ocular

Pasos previos:

1. Colocar el dispositivo en el soporte.
2. Conectar la cámara con el cable.
3. Encender el dispositivo.
4. Confirmar que tiene batería.
5. Ver si hay actualizaciones pendientes y actualizar si es necesario.

Configuración:


1. Abrimos la aplicación “EasyClick”.
2. Elegimos la opción de principiante.
3. Hacemos clic en “posición” para colocar la cámara correctamente. Le damos a “vídeo” y corregimos la posición hasta que la raya se encuentre en el lugar correcto. Confirmamos que lee correctamente la mirada haciendo clic en “avatar” y observando que ambos ojos están en verde.



Cerramos la pestaña y le damos a calibrar.

4. Después de calibrar, cerramos la aplicación en la “x” y abrimos grid3.
5. Le damos a las tres rayitas de la esquina superior izquierda y buscamos “configuración”.
6. En “Acceso”, le damos a “mirada” y a “configuración” en el apartado de calibración. Confirmamos que ponga “cinco puntos de calibración”.



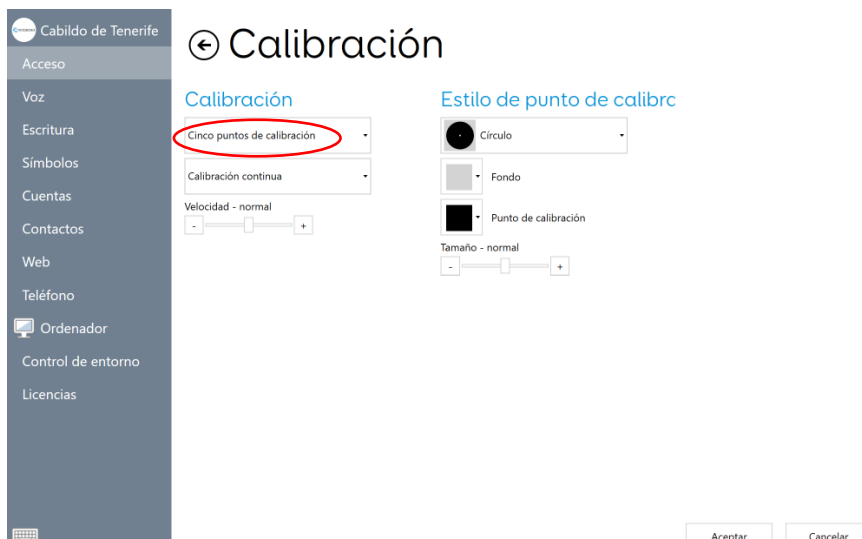

7. Le damos a atrás y a “calibrar”. Cuando termine de calibrar confirmamos que haya obtenido buenas puntuaciones, si no están en verde todos los puntos volveremos a calibrar.



8. Cerramos la configuración y abrimos “Grid Explorer”. Se encuentra en las tres rayas de la esquina superior izquierda.
9. En este momento la persona puede manejar el dispositivo con la mirada. Abrir la opción que desee, por ejemplo:
- La curva de aprendizaje para entrenar la mirada.
 - “Text Talker” para abrir el teclado y comunicarse.

Si observamos en algún momento que no lee bien la mirada podemos repetir el paso 7 y confirmar con el vídeo que la posición es adecuada.